Kurz

Die mittels FibroScan® erzielten Ergebnisse erlauben Ihrem Arzt die Gesundheit Ihrer Leber ohne oder unter Therapie über einen längeren Zeitraum zu beobachten.

Die FibroScan®-Messung darf nicht durchgeführt werden:

- → an einem anderen Organ als der Leber
- → bei Patienten mit aktiven Implantaten oder Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Pumpen...
- → auf Wunden
- → bei schwangeren Frauen
- → bei Patienten mit Aszites



Meine **FibroScan**® Messung



ANWENDER STEMPEL

Liver Scan Direct

Sun Life Financial Centre 3300 Bloor St. W. Suite 3140 11th Floor, Centre Tower Toronto, ON M8X 2X3

For appointments, visit:

www.liverscan.ca

or call **416-268-0150**FibroScan®



WWW.ECHOSENS.COM

PATIENTENINFORMATIONEN ZU DIAGNOSE & MONITORING



Schnelle, schmerzlose und absolut nicht-invasive Untersuchung der Leber...

Haben Sie jemals davon gehört – FibroScan®?









FibroScan®, was ist das?

Untersuchung mit FibroScan®, auch als *transiente Elastographie* bezeichnet, ist eine Technik zur nicht-invasiven und schmerzlosen Leber-Steifigkeitsmessung (gemessen in kPa, korreliert zur Fibrose).

Das Ergebnis erscheint sofort, es zeigt die Entwicklung der Gesundheit der Leber und ermöglicht den Ärzten die Diagnose und Überwachung von Krankheitsverläufen, unabhängig von der Behandlung oder anderen Faktoren.

Die Messergebnisse helfen, verschiedene mögliche Komplikationen im Vorhinein zu erkennen sowie die Überwachung und Bewertung der Schäden, die durch Krankheiten wie Leberzirrhose verursacht werden.

LEBERSTEIFHEIT BESTIMMT DEN GRAD DER FIBROSE



Ist es schmerzhaft? Nein.

Die FibroScan® Untersuchung ist schmerzlos, schnell und einfach. Während der Messung fühlt man nur eine leichte Vibration auf der Haut an der Spitze der Sonde.

Wie wird die FibroScan®-Untersuchung durchgeführt?

- → Sie liegen auf dem Rücken, mit dem rechten Arm hinter den Kopf gelegt. Der Arzt gibt ein auf Wasser basierendes Gel auf die Haut und legt die Sonde mit einem sehr leichten Druck an.
- → Die Prüfung umfasst 10 aufeinanderfolgende Messungen an derselben Stelle.
- → Das Ergebnis am Ende der Prüfung wird errechnet, es ist eine Zahl, welche von 1,5 bis 75 kPa variieren kann. Ihr Arzt wird das Ergebnis beurteilen.

Was machen Sie mit dem Ergebnis?

Ihr Arzt beurteilt das Ergebnis aufgrund Ihrer gesundheitlichen Verfassung.

Wer verschreibt die FibroScan®-Messung?

Ihr Arzt wird Ihnen eine geeignete Zeit für Ihre Untersuchung empfehlen.



"Nach mehreren Biopsien schlug mein Arzt mir vor, die FibroScan®-Untersuchung zu machen"



Welchen Unterschied macht der FibroScan® für mich?

- → FibroScan® liefert sofortige Ergebnisse, es ist leicht und schnell (5-10 Minuten).
- → Die Prüfung ist schmerzfrei und nicht invasiv.
- → Falls eine rasche Folgeuntersuchung gewünscht wird, kann die Untersuchung ohne Bedenken zeitnah wiederholt werden.

FibroScan®-Sonden sind auf alle Körper-Typen angepasst





100% der Patienten akzeptieren eine FibroScan®-Untersuchung.